

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922) 49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
Иваново (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Сургут (3462)77-98-35  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольяти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://schmitz.nt-rt.ru> || [szk@nt-rt.ru](mailto:szk@nt-rt.ru)

## Кресла для гинекологии, урологии, проктологии Arco



arco

# Отличный дизайн и функциональность гинекологических кресел

CE

- Превосходный дизайн, современная технология, оптимальное соотношение цены и качества.
- Низкая исходная высота для удобной посадки в кресло
- Широкий диапазон регулирования положения с приподнятым тазом при помощи электромотора вплоть до положения Тренделенбурга
- Эргономичная система поддержки ног и ступней со встроенными держателями рук для принятия пациентом расслабленной, правильной позы для обследования
- Широкий выбор разных цветов для подушек и лакировки по цветовой шкале фирмы Schmitz
- Разнообразие возможностей оснащения кресел дополнительными принадлежностями
- Закрытая гладкая поверхность, обеспечивающая легкость в гигиенической обработке.
- Функция Memory: внесение в память 3 любых позиции кресла для обследования (114.700 с 8 позициями). Записанные в памяти позиции кресла при отключении электричества остаются сохраненными.



Ручное управление для версий памяти 114.595 + 114.600

Цвета: 114.700  
Лакокрасочное покрытие: белый алюминий RAL 9006.  
Обивка: карибский голубой 82.

Детали из пластика серебристо-серого цвета.

Дизайн: Райнер Шиндхельм





Изменение высоты сиденья с помощью регулирования электромотором положения с приподнятым тазом от 575 мм до 1 320 мм



Положение Тренделенбурга

arco

для гинекологии  
CE

Описание



#### Кресло медицинское манипуляционно-смотровое 114.500

Положение с приподнятым тазом регулируется электромотором; спинная секция соединена под зафиксированным углом наклона (45°) с тазовой секцией; высота сиденья устанавливается с помощью изменения положения с приподнятым тазом от 575 мм до 1320 мм. Опоры для ног со встроенными дугообразными ручками, покрытыми порошковым напылением, поворотные и регулируемые. Включая 1 пару защитных чехлов 101.4800.0. Активизация функций регулировки с помощью ножного управления.

#### Кресло медицинское манипуляционно-смотровое 114.600

Исполнение такое же как модель 114.500, однако имеет дополнительную функцию включения Методу (для 3 позиций), 2 из которых вызываются с помощью ножного управления. Активизация функций регулировки, а также функций Методу с помощью ручного и ножного управления.



#### Кресло медицинское манипуляционно-смотровое 114.495

Исполнение такое же как модель 114.500, однако без опор для ног, для оснащения другой системой для поддержки ног фирмы Schmitz. Активизация функций регулировки с помощью ножного управления.

#### Кресло медицинское манипуляционно-смотровое 114.595

Исполнение такое же как модель 114.495, однако имеет дополнительную функцию Методу для 3 позиций, 2 из которых вызываются с помощью ножного управления. Активизация функций регулировки, а также функций Методу с помощью ручного и ножного управления.



#### Кресло медицинское манипуляционно-смотровое 114.700

С функцией Методу, дополнительное ручное управление для сохранения в памяти и вызова 8 позиций. Положение с приподнятым тазом и **опоры для ног регулируются с помощью электромотора**; спинная секция соединена с тазовой секцией под зафиксированным углом наклона (45°); высота сиденья в положении с приподнятым тазом регулируется от 575 мм до 1320 мм. Активизация функций регулировки, а также функций Методу с помощью ручного и ножного управления. Опоры для ног со встроенными дугообразными ручками, покрытыми порошковым напылением, включая 1 пару защитных чехлов 101.4800.0. 2 встроенные розетки согласно EN 60601-1 (версии для различных стран по запросу), одна из которых переключается с помощью ручного управления.

#### Концепция управления для arco 114.700

- Подсвеченный графический дисплей для отображения всех функций кресла.
- Электронная диагностическая функция.
- 1 программируемая дополнительная кнопка, например, для управления источником холодного света или кольпоскопом через встроенные розетки.
  - Сохранение в памяти и отображение 8 позиций Методу (позиций обследования/по выбору врача)
  - Мягкое движение кресла
  - Управление всеми движениями кресла с помощью ножного и ручного пультов.



### Серийная комплектация:

Мягкая обивка эргономичных подушек спинки и подголовника в соответствии с цветовой картой Schmitz; лоток выдвжной и поворотный из пластика; место для хранения бумаги шириной 400 мм; ножной пульт управления; панель основания с 4 установочными винтами; облицовка из пластика серебристо-серого цвета; Соединительный кабель длиной 3 м с сетевым штепселем, подсоединение: 230 В, 50 Гц, макс. 0,3 кВт  
Версии для различных стран по запросу.  
чистая масса: примерно 130 кг (114.500 и 114.600)  
чистая масса: примерно 94 кг (114.495 и 114.595)  
чистая масса: примерно 135 кг (114.700)  
Безопасная нагрузка: 180 кг

### Лакировка:

Высококачественное порошковое напыление. Блестящая поверхность с высокой сопротивляемостью к ударам и царапинам, легко чистящаяся, устойчивая к дезинфицирующим средствам и климатическим условиям.

Поставляемые цвета согласно цветовой карте Schmitz без доплаты.

**Дополнительные цвета по карте RAL  
Модель № 100.0510.0**


### Обивка

Пеноматериал с высококачественной, износоустойчивой обивкой из искусственной кожи.

Поставляемые цвета без доплаты по цветовой карте Schmitz (classic и comfort).

### Рекомендации при заказе:

Следующие данные необходимы при заказе кресла серии arco: цвет обивки (см. цветовую шкалу), порошковое напыление для станины и рамы (см. цветовую шкалу).




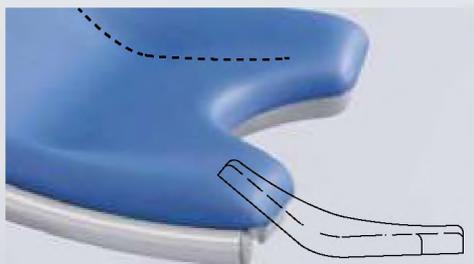


Прямо оформленный контур посадки для расслабленной, правильной позиции для обследования.



Встроенные розетки только у модели 114.700.

### Функции регулировки и размеры

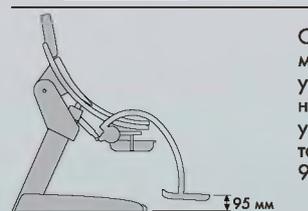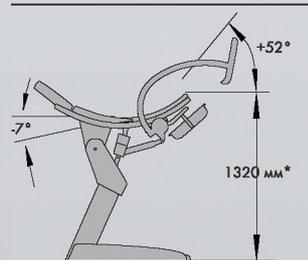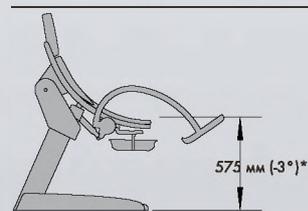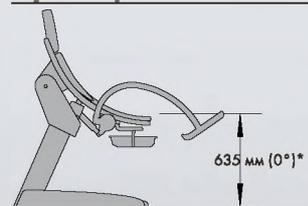

Опоры для ног можно опускать под углом 0° на 200 мм над полом под углом - 3° наклон тазовой секции, 95 мм над полом

Панель основания 960 x 565 мм

Ширина обивки 565 мм (тазовой секции)  
до 695 мм (спинной секции)

\* в сочетании с передвижными колесиками 101.0223.0 + 75 мм.  
Мы оставляем за собой право на конструктивные изменения и изменения размеров.

Положения с приподнятым тазом  
114.495 до 114.700



электрическая регулировка опор для ног  
114.700

# arco

## Принадлежности

### CE

1  
**Защитный чехол из ПВХ 101.4820.0**  
для подушки сиденья.

2  
**Рулон бумаги 100.1760.0**  
шириной 400 мм для встроенного лотка  
со съемной подушкой спинки.

3  
**Педальная скоба для врача 101.4700.0**

4  
**Передвижные колесики 101.0223.0**  
для моделей 114.495, 114.500 и 114.700  
4 двойных колеса Ø 75 мм, регулируемые и элект-  
тропроводящие (без возможности дооснащения).

**Внимание!**  
**Недопустимо для перевозки пациентов!**

5  
**Держатель для кольпоскопа 101.4210.0**  
систем Leisegang, Leica, Kaps и Zeiss, устанавливаем-  
ый справа или слева.  
Для систем Kaps и Zeiss просьба заказывать у  
поставщиков кольпоскопов соединительную  
трубку совместно с держателем зажимов!  
Без кольпоскопа!  
Не используется в сочетании с передвижными  
колесиками 101.0223.0

6  
**Обивка из искусственной кожи (пара)**  
**101.4850.0**  
для дугообразных ручек на молнии,  
согласно цветовой карте

**Обивка из искусственной кожи (пара)**  
**101.4860.0**  
для дугообразных ручек у модели 101.4580.0,  
на молнии, согласно цветовой карте  
(без рис.)

7  
**Головная подушка 101.3730.0**  
на липучке, обивка из искусственной  
кожи по цветовой карте

8  
**Защитные чехлы (пара)**  
**101.4800.0**  
для панелей на опорах  
для ног и з прозрачного пластика.

**Лоток 101.3850.0**  
(Доплата) из хромникелевой стали 18/10,  
350 x 325 x 65 мм (без рис.)

**Лоток 101.3860.0**  
как 101.3850.0,  
однако подходит для модели 114.700  
(без рис.)



5 114.500 с 101.4210.0 (без кольпоскопа)



9

114.495 с 101.4580.0



11

114.495 с  
101.1360.0, 101.1670.0, 101.2270.0

12



10

114.495 с 101.2310.0, 101.1360.0

**агсо модели 114.495 до 114.600 могут быть также оснащены другими системами для поддержки ног Schmitz:**

9

**Держатели ног по Гёпелю со встроенной ручкой (пара) 101.4580.0**

10

**Эрго-степы (пара) 101.2310.0**

Система поддержки ног с регулируемыми лотками для пяток/икр из серого пластика, поворачивающимися в стороны. Встроенные ручки из круглой трубки цвета кресла. Крепежные детали из хромникелевой стали 18/10 для монтажа на боковых шинах. (просьба предусмотреть 101.1360.0)

11

**Держатели ног по Гёпелю (штука) 101.2270.0**

Подушка из пенопласта серебристо-серого цвета с привязными ремнями. Опора из хромникелевой стали 18/10, без фиксирующих зажимов. (просьба предусмотреть 101.1360.0 и 101.1670.0)

**Боковые шины (пара) 101.1360.0**

для тазовой секции, из хромникелевой стали 25 x 10 мм, 290 мм в длину, включая крепежные панели для трубчатых рам.

**Фиксирующий зажим (штука) 101.1670.0**

вращающийся, из хромникелевой стали 18/10, для монтажа на боковых шинах.

**Ручка (штука) 101.1580.0**

из пенопласта серебристо-серого цвета для монтажа на боковой шине 101.1360.0. (Предусмотреть только при использовании держателей ног 101.2270.0!)

12

**Боковая шина (штука) 101.1400.0**

для тазовой секции из хромникелевой стали 25 x 10 мм, длиной 150 мм, монтируется на трубчатой раме.



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922) 49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Россия** (495)268-04-70

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Казахстан** (772)734-952-31

**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93