

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://schmitz.nt-rt.ru> || szk@nt-rt.ru

Кровать родовая Partura



Partura — это новый подход к родам — комбинация комфорта, гибкости и безопасности.

В современной медицинской практике уделяется особое внимание как безопасности, так и удовлетворению нужд пациента. Этим требованиям отвечает новая родовая кровать фирмы Schmitz. Привлекательный дизайн и максимальный комфорт для будущей мамы и самые благоприятные рабочие условия для акушерской команды.




Родовые кровати Partura разработаны таким образом, что будущая мать располагает максимальной свободой движений на первом этапе родов и в период выхода плода. При помощи ручного управления родовой кроватью Partura можно регулировать безгранично. Роженица может регулировать профиль стола Partura согласно своим собственным нуждам.

Поверхность стола Partura, имеющая приятную обивку, достаточно велика, чтобы позволить партнеру активно поддерживать будущую мать. Ножную секцию можно использовать как сидение для акушерки.

Мягкое, гладкое покрывало и подушки стола Partura легко поддаются мытью и дезинфекции. При необходимости, в два-три приема можно приспособить стол Partura для срочного хирургического вмешательства. Родовые кровати Partura нового поколения — для легких и безопасных родов.

- Основная секция кровати родовой включает в себя седалищную, опорную и ножную секции, на роликах, центральный фиксатор.
- Седалищная секция имеет вырез радиуса 150 мм.
- Матрац — из двух частей для седалищной и ножной секции; сделан из высокоэластичного поролона; водоотталкивающие свойства и отсутствие скольжения.
- Обшивка и каркас сделаны из листовой стали с напылением.
- Белый чехол из двух частей, стирка до 95 °С.
- Основная и ножная секции разделены. Ножную секцию можно задвигать под основную в четырех фиксированных положениях.
- Спинная опора с покрытием из кожзаменителя крепится со стороны головы или ног.
- Цвет отделки можно выбрать из цветового перечня.
- Две опоры для ног типа Goerel, нержавеющая сталь 18/10, цельная поролоновая подкладка с покрытием из кожзаменителя, регулировка высоты.
- Два вращающихся сочленения для крепления ножных опор.
- Две ручки, нержавеющая сталь 18/10, поролоновая подкладка с покрытием из кожзаменителя; крепится по бокам стола.
- Штатив для переливания с 4-мя крючками, нержавеющая сталь 18/10. Может устанавливаться в голове или рядом с ручками, регулировка высоты.
- Спинная опора рядом с вырезом в седалищной секции; полукруглая поролоновая подкладка с покрытием из кожзаменителя. Для родов в положении на корточках.
- Два пульта управления, слева и справа от основной секции.
- Неограниченная регулировка при помощи электропривода:
 - Регулировка высоты основной секции
 - Регулировка опорной секции
 - Регулировка седалищной секции
 - Наклон поверхности (на случай шока)
 - Регулировка высоты ножной секции (в соединении с основной секцией)
- Встроенный аварийный источник питания на случай кратковременной потери напряжения.

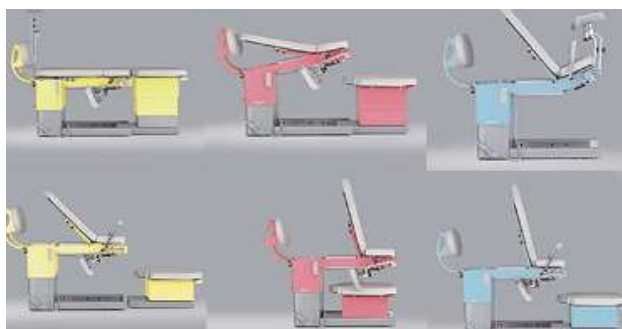



Первый этап родов. Стол Partura

находится в нижнем положении

(64 см) для отдыха или

перемещения. Малая высота

стола Partura дает возможность

подниматься со стола и ложиться

на него.



Второй этап родов в

вертикальном положении с

партнером. Женщина

может опереться на своего

партнера.



Роды в классическом положении.



Роды в положении на

корточках, оптимизация

родовой оси, промежность

расслаблена.



Роды в положении на корточках с

партнером. При появлении

головки плода мужчина может

слегка приподнять женщину.



Первый этап родов и/или

промежуточный этап в

коленно-локтевом

положении в случае потуг

при оставшемся в прежнем

положении проходе шейки

или в случае

внутриматочной асфиксии.

Роды с хирургическим

Роды в коленно-локтевом



вмешательством, роды при помощи щипцов или вакуумная экстракция, ручное выжимание в случае ягодичного предлежания плода, послеродовая обработка промежности, ручное удаление плаценты.



положении для повторнородящих женщин, если необходимо расслабить промежность или при рождении особенно крупных детей.



Кесарево сечение в родильной палате.



Второй этап родов в вертикальном положении — удобная сидячая поза. Вырез в матрасе исключает давление на промежность. В случае ягодичного предлежания плода возможно ручное выжимание.



Положение в случае шока — пролапс полового шнура или большой потери крови.



После родов в коленно-локтевом положении. После выхода плода женщине не нужно переворачиваться. Она может просто сесть, откинувшись назад.



Роды в положении Тренделенбург в случае патологических родов, хирургического вмешательства



Поднятие ног для расслабления.

Технические характеристики стола Partura

Регулировка высоты основной секции
645–925 мм
Регулировка высоты ножной секции
460–925 мм
Габариты родильного стола, включая спинку
2330 × 1015 мм
Длина матраца на спинной опоре
890 мм
Длина матраца на сидеальной секции
350 мм
Длина матраца на ножной секции
695 мм
Толщина матраца
80 мм
Угол наклона поверхности стола
0–12 °
Угол регулировки спинной секции
0–78 °
Угол регулировки сидеальной секции
0–27 °
Вес
280 кг
Напряжение питания
230 В, 50 Гц, 0,36 кВт

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93